

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK-HIGIENA PASZ I ŚRODOWISKA (WYMAZ ZE ŚRODOWISKA)

1. Upewnij się, że posiadasz niezbędne narzędzia do pobierania próbek, które są czyste i zdezynfekowane.
2. Wszystkie etapy przygotowywania materiału do badania wykonuj w rękawiczkach oraz unikaj kontaktu wymazówek z obcym materiałem.
3. Otwórz pudełko z zestawem i wyjmij wymazówki z podłożem.
4. Przytwierdź naklejkę z kodem.
5. Materiał pobieraj przed jakimikolwiek procesami mycia i dezynfekcji.
6. Z wyznaczonych punktów krytycznych pobierz materiał poprzez rolowanie wymazówki pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Następnie umieść wymazówkę w pojemniku, z którego została wyjęta i zabezpiecz parafilmem.
7. Jeżeli badana jest powierzchnia płaska – wyznacz z niej 100cm² i roluj wymazówkę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym dziesięciokrotnie poziomo (od prawej do lewej), a następnie pionowo (od góry do dołu). Jeżeli w badanym pomieszczeniu znajdują się regały z klatkami roluj wymazówkę na różnych kondygnacjach.
8. Upewnij się że wszystkie wymazówki są szczelnie zamknięte i oklejone następnie umieść je w załączonym woreczku strunowym.
9. Tak przygotowane i oklejone próbki prześlij niezwłocznie do laboratorium.

**W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z pracownikami Weterynaryjnego
Laboratorium Diagnostycznego ALAB bioscience
Tel. 516 544 853 e-mail: karolina.zydron@alab.com.pl**